



Mini halló készülék használati utasítása:

Biztonsági figyelmeztetések · A hallókészüléket mindig rendeltetésszerűen, a használati utasítás szerint használja. A hallókészülékek nem állítják helyre a normál hallást, vagy előzik meg a szervi körülményekből adódó halláscsökkenést. · Soha ne tegye a hallókészüléket vagy az elemet a szájába, mert így könnyen lenyelheti. · Az elemeket tartsa távol a gyógyszerektől, mert azok könnyen összetéveszthetők. · Amennyiben véletlenül lenyeli a hallókészüléket vagy az elemet, kérjük, azonnal keresse fel orvosát. · Tájékoztatjuk, hogy a hallókészülék viselésével megnövekedhet a hallójáratban összegyűlt fülzsír mennyisége. · Ilyen esetben kérjük, keresse fel fül-orr-gégészét a felgyülemlett fülzsír eltávolításával kapcsolatban. · Keresse fel orvosát, ha megnövekedett fülzsírtermelődést vagy bőrirritációt tapasztal.

Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a mikrofon nyílásába, és ne tegyen semmit a hangszóró kimeneti nyílásába, mert ezzel könnyen kárt tehet hallókészülékében. · Ne tegye ki hallókészülékét nagy hőnek, ne hagyja az átforrósodó autóban nyáron, radiátor közelében stb. · Ne hordja hallókészülékét úszás, búvárkodás vagy ezekhez hasonló tevékenységek közben. · Ne merítse hallókészülékét vízbe vagy egyéb folyadékba. · Kérjük, vegye ki hallókészülékét lefekvés előtt. · Amikor nem hordja hallókészülékét, tartsa azt a mellékelt műanyag készülék tartóban.