



M4 SMART FITNESS OKOSKARKÖTŐ PULZUS ÉS VÉRNYOMÁS MÉRŐVEL

Töltse fel az órát

Illessze bele a töltőbe az órát! Első használatkor törekedjen a közepes töltöttségi szintre.

Telepítse az óra applikációját a telefonjára

Töltse le a Wearfit nevű alkalmazást! Amennyiben nem találja, olvassa be a dobozában lévő használati utasításon szereplő QR kódot. Engedélyezze a szükséges hozzáféréseket, különben el sem indul az alkalmazás!



Eszköz csatlakoztatása

Először az applikációba kell belépnie, hogy csatlakoztassa az órával, ehhez Bluetooth szükséges (Bluetooth 4.0). Sikeres kapcsolódás után az adatok automatikusan szinkronizálódnak az applikáció és az óra közt.

Nyissa meg az alkalmazást -> nyomjon a „Start scanning” lehetőségre -> nyomjon az eszközre a csatlakozáshoz

A sikeres párosítás után a telefon elmenti az eszköz Bluetooth címét, így ha az alkalmazás fut, automatikusan keresi az órát.

Az eszköz funkciói

Ha a készülék kikapcsolt állapotban van, érintse meg, és tartsa a gombot legalább 3 másodpercig a bekapcsoláshoz.

Képernyőkímélő módból ébresztéshez koppintson a funkciógombra!

Az oldalak közti váltáshoz érintse meg röviden a funkciógombot!

A pulzus és vérnyomásmérőnek szüksége van egy kis időre az adatgyűjtéshez.

Ne zavarjanak mód

Az alkalmazásban kapcsolhatja be. Akár időszakokat is megadhat, amikor nem szeretné, hogy zavarják.

FIGYELMEZTETÉSEK

Fürdés vagy úszás közben ne viselje!

A küldött töltőkábelt használja az eszköz töltéséhez!

Ne tegye ki az órát magas páratartalomnak, nagyon magas vagy alacsony hőségnek hosszabb időre!